



Score sur l'Echelle de Braden



**ALOVA
GALBÉ**

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**



20 ≤ 200 kg



Housse



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



69,00€ avec PLV taille standard
81,00€ avec PLV coussin technique
Codes suivant les réfs - voir tableaux

	CODE LPPR	TARIF AVEC PLV (€TTC)
Coussin ALOVA GALBÉ, standard	1280036	69,00
Coussin ALOVA GALBÉ, standard < 38cm	1256546	81,00
Coussin ALOVA GALBÉ, standard < 45cm	1276951	81,00
Coussin ALOVA GALBÉ, Technique butée pelvienne et XL	1223297	81,00


LES + PRODUIT

- 16 tailles, 3 hauteurs disponibles pour répondre à tous les besoins et s'intégrer dans le fauteuil adapté.
- Prévention renforcée des risques d'escarres ischiatiques et coccygiennes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m³) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales.
- ▶ Décharge sacro-coccygienne intégrée pour une prévention renforcée des risques d'escarres.
- ▶ Déclive du coussin pour réduire le risque de glissé avant.
- ▶ Galbe au niveau des cuisses pour favoriser leur bon alignement.
- ▶ Rotateur externe pour un maintien des membres inférieurs en légère abduction et réduire des appuis cutanés dommageables.
- ▶ Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée.
- ▶ Base de la housse inférieure antidérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise


Cartographie des valeurs de répartition des pressions patient 80 kg/172 cm.

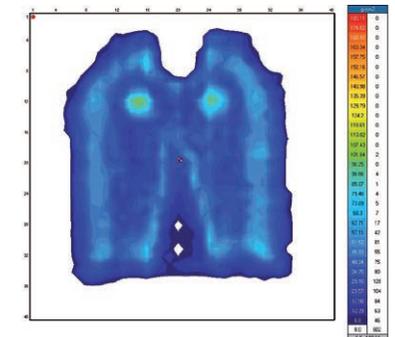




ERGONOMIE

Étiquette pour indiquer
la position du coussin

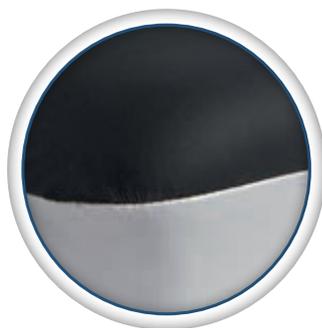

HOUSSE PROMUST PU

(jersey enduit polyuréthane) amovible,
extensible et respirante

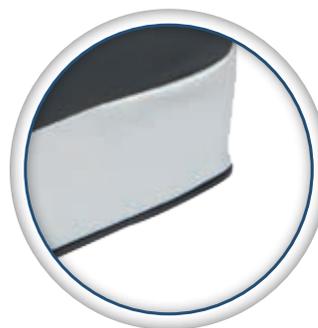

BASE ANTI-DÉRAPANTE

pour limiter les effets de glissé avant



POIGNÉE

pour faciliter les transferts.

LES 3 DÉCLINAISONS

COUSSIN GALBÉ **ALOVA**[®]



COUSSIN GALBÉ **ALOVA**[®] avec soutien pelvien



Butée Pelvienne d'une hauteur supérieure à 8 cm

COUSSIN GALBÉ **ALOVA**[®] **XXL**



Épaisseur de 9 cm de mousse bi-strates





ALOVA
GALBÉ

ROTATEUR EXTERNE

Pour garantir le bon alignement des membres inférieurs




TAILLE

Taille imprimée sur le coussin

DÉCHARGE COCCYGIENNE

Prévention renforcée des risques d'escarre(s) ischiatique(s) et sacro-coccygienne(s)

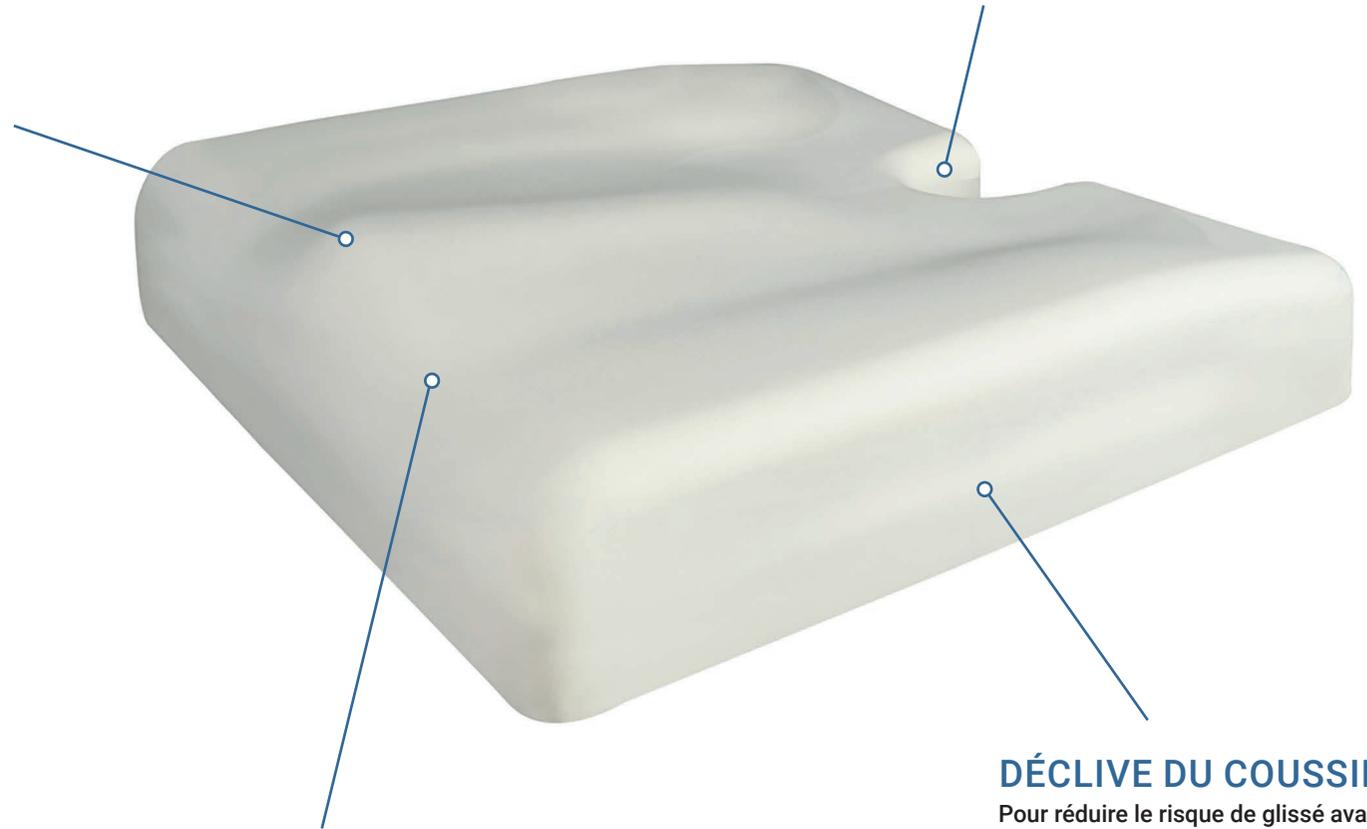

DÉCLIVE DU COUSSIN

Pour réduire le risque de glissé avant

ÉPAISSEUR > 6 cm

Pour une prévention renforcée des risques d'escarre(s) ischiatique(s) et sacro-coccygienne(s)



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LARGEUR CM	PROFONDEUR CM	HAUTEUR CM mini / maxi*	POIDS PATIENT KG
COUSSIN ALOVA GALBÉ STANDARD	VCAG3636	36	36	6 < 9	20 à 80
	VCAG4343	43	43	6 < 9	30 à 100
	VCAG4340	43	40	6 < 9	30 à 90
	VCAG4540	45	40	6 < 9	30 à 120
	VCAG3841	38	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4041	40	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4341	43	41	6 < 9	30 à 100
	VCAG4043	40	43	6 < 9	30 à 90
	VCAG4544	45	44	6 < 9	30 à 120
	VCAG5044	50	44	6 < 9	30 à 135
	VCAG4347	43	47	6 < 9	30 à 120
	VCAG5250	52	50	7 < 10	120 à 160
	VCAG5450	54	50	7 < 10	120 à 160
	VCAG5650	56	50	7 < 10	120 à 200
	VCAG6050	60	50	7 < 10	120 à 200
COUSSIN ALOVA GALBÉ TECHNIQUE BUTÉE PELVIENNE	VCAG4343XL	43	43	9 < 12	30 à 110
	VGAG5044XL	50	44	9 < 12	30 à 135
	VCAG3841BP	38	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4041BP	40	41	6 < 9	30 à 90
	VCAG4341BP	43	41	6 < 9	30 à 100
	VCAG4343BP	43	43	6 < 9	30 à 100
	VCAG4544BP	45	44	6 < 9	30 à 120
	VCAG5044BP	50	44	6 < 9	30 à 135
VCAG4347BP	43	47	6 < 9	30 à 120	

* Hauteur mini = Hauteur du coussin mesurée en fond de galbe / Hauteur maxi = hauteur totale du coussin

Protection compatible avec les produits détergent-désinfectants d'usage hospitalier.

