

DISPOSITIFS D'AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE EN MICRO-BILLES



LES COUSSINS DE POSITIONNEMENT **ASKLÉSANTÉ** PERMETTENT LA MISE EN PLACE SIMPLE ET RAPIDE DE DIFFÉRENTES POSTURES CONTRIBUANT À RÉDUIRE LA PRESSION EXERCÉE SUR LA PEAU ET LES TISSUS AU NIVEAU DES ZONES ANATOMIQUES À RISQUE D'ESCARRE.

- **Performance** : multiplicité des solutions aux besoins cliniques et au confort des personnes soignées.
- **Efficacité** : prévention par décharge des zones anatomiques vulnérables et maintien durable des postures réalisées.
- **Ergonomie** : conformabilité aux régions anatomiques exposées, légèreté des accessoires et simplicité d'installation.
- **Sécurité** : protection en Promust PU Haute Densité avec coutures renforcées par festonnage intérieur surpiqué.



PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRE AU NIVEAU DE LA RÉGION TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses apparaissant principalement chez les patients alités en décubitus latéral strict. Les experts recommandent la position en décubitus semi latéral à 30°.

• **La solution ASKLÉSANTÉ : le coussin de positionnement latéral 30°.**

- + 2 tailles pour une adaptation optimale à la taille des personnes.
- + Un oreiller intégré pour le confort de l'utilisateur.
- + Une installation facile, sans effort et rapide du patient.
- + Un maintien stable et durable.



PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont fréquentes aux talons, principalement chez les patients alités. Les experts recommandent la mise en décharge totale des coudes et des talons en décubitus dorsal.

• **La solution ASKLÉSANTÉ : des plots de positionnement au niveau de la jambe et de l'avant bras.**

- + L'inclinaison sensible est favorable au retour veineux.
- + La bordure régulière du dispositif est non traumatique.
- + Pas de surpression au niveau du tendon d'Achille et des malléoles.
- + Soulagement de la pression d'appui au niveau des coudes.



PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients présentant des rétractions musculotendineuses des membres inférieurs. Les experts recommandent l'abduction des membres inférieurs pour la décharge des malléoles, des condyles et des genoux. Décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

• **La solution ASKLÉSANTÉ : le coussin cylindrique associé au plot d'abduction des genoux.**

- + Maintien des membres inférieurs en abduction.
- + Réduction de l'appui exercé au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes.
- + Protection des points de contact des genoux.





PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en position affaissée vers l'avant, ou chez des patients alités en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques fréquentes chez les patients assis. C'est l'escarre la plus fréquente chez la personne paraplégique. Les experts recommandent une position dite de type Semi Fowler pour décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

- **La solution ASKLÉSANTÉ : l'association de 4 coussins adaptés.**

- + Réduction du « glissé avant » responsable du cisaillement des tissus.
- + Limite le risque de chute.
- + Alternative aux utilisations de lits non médicalisés.
- + Soulagement de la pression d'appui au niveau des coudes.



UNE AIDE À LA PRÉVENTION DES POSITIONS VICIEUSES DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE


- **La solution ASKLÉSANTÉ : le coussin cylindrique placé sous les genoux.**

- + Réduit le creux lombaire.
- + Soulage les douleurs d'origine facettaires.

LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES EN POSITION D'ABDUCTION

- **La solution ASKLÉ SANTÉ : le coussin d'abduction de hanche.**

- + Est indiqué en phase post opératoire de prothèse de hanche.
- + Limite le risque de luxation d'une Prothèse Totale de Hanche lors des retournements des patients.

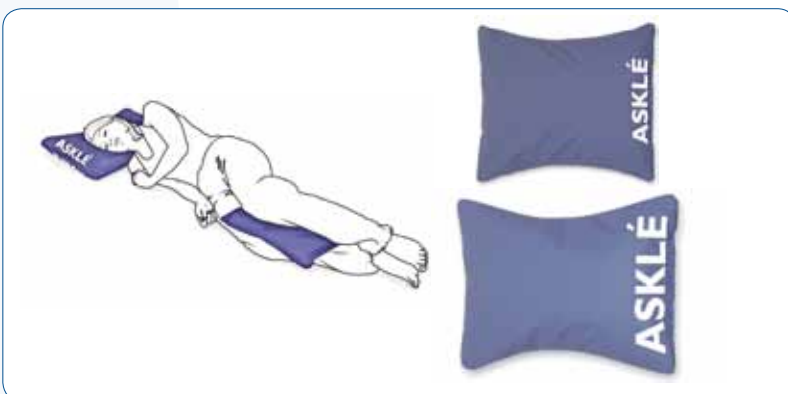

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

- **Les coussins universel T1 et T2.**

- + S'adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls ou en association).
- + Se substituent à l'usage dérivé des oreillers dans le respect de la prévention du risque de contaminations croisées.
- + Facilitent l'installation ou les retournements lors des actes de soins.
- + Présentent un encombrement réduit pour un rangement facilité.













HOUSSE DE PROTECTION LAVABLE POUR ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

- Une housse pour chaque coussin de la gamme (voir références au dos).
- Rabat* de protection de la fermeture permettant d'éviter les infiltrations.
- Etiquette de traçabilité avec conditions d'entretien et composition à l'intérieur des housses.

* (sauf pour réf. VHOCPO5 et VHOCPO6)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		POIDS (kg)	DIMENSIONS (cm)	HOUSSES
		PROMUST PU HD	HOUSSE SOUDEE CIC			
	Coussin bouée modulaire de forme circulaire	VCP12	VCP12CIC	0,50	46 x 46	VHOCPI2
	Coussin 1/2 bouée Plot d'abduction des genoux	VCP01	VCP01CIC	0,36	60 x 35	VHOCPO1
	Coussin Universel 1	VCP02	VCP02CIC	0,23	37 x 26	VHOCPO2
	Coussin Universel 2	VCP03	VCP03CIC	0,58	56 x 40	VHOCPO3
	Coussin Base cylindrique	VCP04	VCP04CIC	0,64	Ø 21 x 60	VHOCPO4
	Coussin Plot de Positionnement Pied	VCP05	VCP05CIC	0,23	39 x 21	VHOCPO5
	Coussin Plot de Positionnement Main	VCP06	VCP06CIC	0,23	39 x 21	VHOCPO6
	Coussin d'abduction des Hanches	VCP07	VCP07CIC	0,43	35 x 28	VHOCPO7
	Coussin de Positionnement latéral 30°	VCP08 T > 165 cm	VCP08CIC	2,20	182 x 54	VHOCPO8
		VCP11 T < 165 cm	VCP11CIC	2,00	170 x 74	VHOCPI1
	Coussin de Positionnement 1/2 lune	VCP09	VCP09CIC	1,9	137 x 80	VHOCPO9
	Sac de Transport	VCP10	—	0,65	80 x 90	—

KIT DÉCOUVERTE

RÉFÉRENCES	CONTENU
VCP/KIT01/V1	Ensemble des coussins, incluse la référence VCP08
VCP/KIT02/V1	Ensemble des coussins, incluse la référence VCP11

MATÉRIAUX

- **COUSSIN**
Protection Promust PU HD.
Microbilles Polystyrène Expansé (PSE) dont 99 % du volume se compose d'air.
Coutures Fil de polyester bactériostatique.
- **HOUSSE**
Protection Promust PU HD.
ou Housse soudée CIC (Contrôle des Infections Croisées) Ag²⁺



ENTRETIEN

- **COUSSIN**
Entretien au moyen d'une lavette imprégnée d'une solution détergente ou de détergent ou désinfectant de surface marqué CE.



- **HOUSSE**



NORME FEU

- **COUSSIN**
EN 597- 1 et 2 Protection PU HD CribV
- **HOUSSE**
EN 597- 1 et 2 CribV

ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail : contact@askle.com

www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, ASKLÉ SANTÉ se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.